



Cavilon™

Solutions de Soins Cutanés

Protocole d'utilisation

Film protecteur cutané haute résistance

3M™ Cavilon™ Advanced

dans la prévention et le traitement de la Dermite Associée à l'Incontinence (DAI)



Comment appliquer le film protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced.

dans la prévention et le traitement de la Dermite Associée à l'Incontinence (DAI)

Matériel nécessaire :

- ▶ Lingettes pour le bain et la toilette 3M™ Cavilon™ ou tissu doux imprégné d'eau
- ▶ Film protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced
- ▶ Gants à usage unique

Préparer le matériel



Disposer le matériel sur une surface propre.



Ouvrir l'emballage du film protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced et laisser l'applicateur dans son emballage.



Réaliser la toilette du patient



Préparer le patient : découvrir la zone du corps à laver. Limiter la zone de nudité et maintenir une bonne température du patient pendant le soin.



Nettoyer la peau délicatement avec un nettoyant cutané au pH neutre ou de l'eau seule. Sécher la peau en tamponnant si nécessaire. En cas de lésions cutanées (excoriations), retirer l'excès d'écoulement séreux ou sérosanguin à l'aide d'une compresse.

Changer de gants



Changer les gants après la toilette.



Film protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced 5050G

Applicateur de 2.7ml = une feuille A4



Film protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced 5051G

Applicateur de 0.7ml = une carte postale

Plusieurs applicateurs peuvent être utilisés si nécessaire pour couvrir des zones plus importantes.

Se reporter à la notice du Film protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced pour des informations complémentaires.

Appliquer le film protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced



Saisir l'applicateur et placer le pouce sur l'extrémité du levier.

Diriger l'applicateur mousse vers le bas et enfoncer fermement le levier pour casser l'ampoule interne.

Un bruit d'éclatement ou de bris se fait entendre lorsque l'ampoule se rompt : il n'est alors plus nécessaire de maintenir la pression sur le levier.



Laisser l'applicateur orienté vers le bas pendant environ 10 secondes pour que le liquide imprègne la mousse. Le liquide s'écoule, il est donc inutile de maintenir la pression sur le levier.

Le liquide ne saturera pas complètement l'éponge. Vérifier juste que le liquide est visible sur l'éponge.



Appliquer le film protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced en passant délicatement la mousse sur la zone à traiter et la peau péri-lésionnelle. Réaliser un mouvement de va-et-vient régulier avec un chevauchement minimal du produit.

Ne pas appliquer de pression supplémentaire sur l'applicateur car cela pourrait entraîner une accumulation excessive du produit.



Poursuivre l'application jusqu'à ce que la totalité de la zone à traiter soit couverte. Il est important d'appliquer le produit sur la totalité de la peau exposée aux selles et/ou à l'urine.



Laisser sécher pendant au moins 60 secondes ou jusqu'à ce que cela soit sec au toucher. Si une zone a été oubliée, attendre que le produit sèche complètement avant de renouveler l'application.



Si le film protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced est appliqué dans un pli de la peau ou une autre zone de contact peau contre peau, s'assurer que les surfaces cutanées sont bien séparées lors de l'application et du temps de séchage (au moins 60 secondes). Vous pourrez ensuite laisser la peau revenir à sa position initiale.

Informations complémentaires



Appliquer le produit 2 fois par semaine.

Le film protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced est semi-perméable et résistant aux toilettes quotidiennes. Une application plus fréquente pourrait entraîner une accumulation de produit.

Veuillez noter que 60 secondes est le temps de séchage recommandé. En effet, le temps de séchage peut être différent pour chaque patient en fonction du type de peau et de la gravité des lésions cutanées. Le temps de séchage peut varier de 30 secondes et dans certains cas, il peut prendre jusqu'à 5 minutes ou plus. Veillez à ce que le temps de séchage soit suffisant et que la peau soit « sèche au toucher ». Par exemple, ceci est particulièrement important si le patient porte une protection anatomique contre l'incontinence.

Le film disparaît naturellement avec la desquamation de la peau : il n'est pas nécessaire de le retirer. Si nécessité de retirer le produit, utilisez un dissolvant contenant de l'hexaméthylcyclotrisiloxane (HMDS) ou un polymère de silicone.

Il est conseillé d'utiliser un dissolvant contenant du HMDS ou un polymère de silicone chaque fois qu'il est nécessaire de retirer un pansement ou un dispositif adhésif d'une zone qui a été recouverte avec le film protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced

Enfin...

le pouvoir de mettre fin à la Dermite Associée à l'Incontinence (DAI)

Pour plus d'informations,

- Connectez-vous sur notre site www.3mfrance.fr/endMASD
- Contactez votre commercial 3M



Informations de commande

Film protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced

Code 3M	Description	Articles/boîte
5050G4P	Applicateur mousse de 2.7ml (stérile)	4
5050G	Applicateur mousse de 2.7ml (stérile)	20
5051G4P	Applicateur mousse de 0.7ml (stérile)	4
5051G	Applicateur mousse de 0.7ml (stérile)	20



Découvrez comment les solutions de soins cutanés 3M™ Cavilon™ peuvent vous aider à transformer l'intégrité de la peau des patients sur www.3mfrance.fr/endMASD



3M France
Division Solutions Médicales
1 Parvis de l'innovation
CS 20203
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 61 61
www.3MFrance.fr/medical

MSD-01045 - Décembre 2022. 3M et Cavilon sont des marques déposées de 3M. Photos non contractuelles. Le protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced est un Dispositif Médical (DM) de classe IIa. Marquage CE2797. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les notices avant toute utilisation. Distribués par 3M France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

